


Вращательная система
обслуживания гарантирует чистку
и смазку каждого наконечника


Низкоскоростные наконечники

Низкоскоростные наконечники состоят из зубчатых механизмов, которым необходимо повышенное проникновение раствора. По этой причине порт системы Care3 Plus вращает зубчатый механизм внутри низкоскоростного наконечника, облегчая проникновение раствора ко всем внутренним деталям. В то же время загрязнения, находящиеся в каналах охлаждения и воздушных каналах, вымываются чистящим раствором.

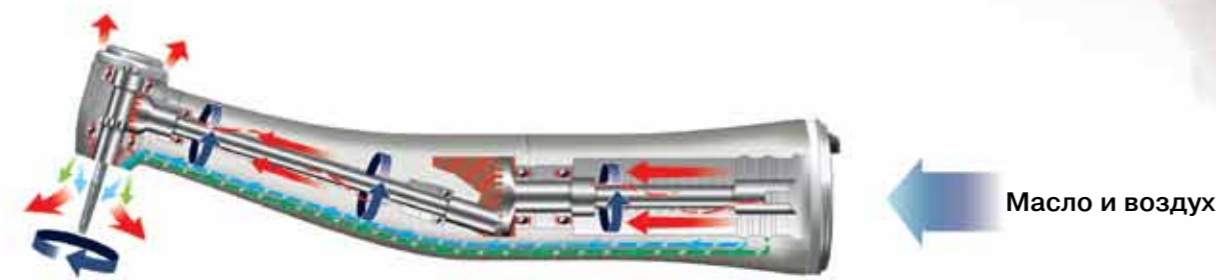

Высокоскоростные наконечники

Care3 Plus тщательно очищает и смывает все детали наконечника, а также все каналы подачи воды и воздуха.

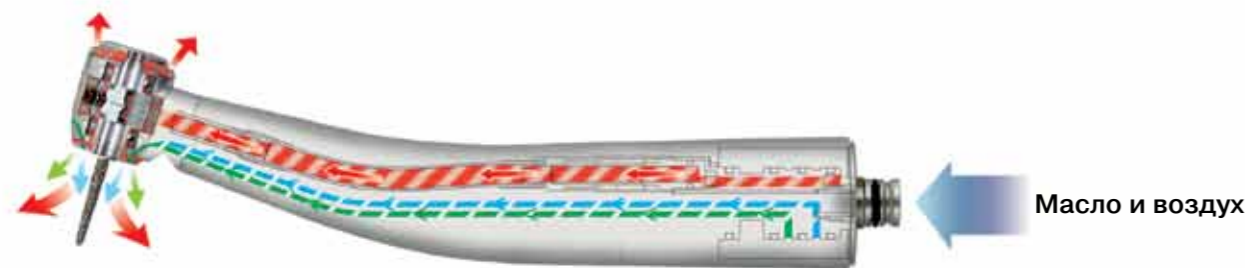

Комплектация

Тип C1
Один порт вращения
+ два стандартных порта



Порт вращения Стандартный порт Стандартный порт

Тип C2
Два порта вращения
+ один стандартный порт



Порт вращения Порт вращения Стандартный порт

Комплект Care3 Plus



Один порт вращения
+ два стандартных порта

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Care3 Plus Тип C1 (120В)	Y141202
Care3 Plus Тип C1 (230В)	Y141204

Два порта вращения
+ один стандартный порт

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Care3 Plus Тип C2 (120В)	Y141203
Care3 Plus Тип C2 (230В)	Y141204

Комплектация

- Блок Care3 Plus
- Шнур питания с L-образным штекером
- Раствор для техобслуживания (1 литр)
- Воронка с фильтром для заливки масла
- Комплект масляных фильтров
- Воздушный шланг
- Воздушный фильтр
- Масляный абсорбер

Технические характеристики

- Питание: 120 В, 60 Гц или 230 В, 50/60 Гц
- Давление воздуха: 0,35–0,6 МПа (3,5–6 кгс/см²)
- Вес: 7,1 кг (C1 тип), 7,2 кг (C2 тип)
- Размер: Ш 280 x Д 275 x В 360 (мм)
- Вместимость емкости для масла: 350 мл

- Около 3 500 наконечников очищаются и смазываются при полной емкости (цикл S)
- Подсоединение только к четырехканальному разъему Midwest.
- Требуется подача воздуха (3,5–6 кгс/см²).

Адаптеры Care3 Plus

МОДЕЛЬ	АДАПТЕРЫ Care3 Plus	КОД ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	АДАПТЕРЫ Care3 Plus	КОД ЗАКАЗА
Адаптер E-типа *	Для всех брендов ISO модели E	Z280035	Адаптер SR	Для высокоскоростных наконечников с разъемом Sirona® SR	Z257023
Адаптер PTL	Для высокоскоростных наконечников с разъемом PTL-CL-4HV-T	Z257010	Адаптер WH	Для высокоскоростных наконечников W&H® под разъем Roto Quick	Z257021
Адаптер QD	Для высокоскоростных наконечников с разъемом MACH-QD и CH-QD	Z257011	Адаптер BA*	Для высокоскоростных наконечников Bien-Air® под разъем Unifix®	Z280022
Адаптер B2/M4	Для высокоскоростных наконечников с двухканальным разъемом Borden	T904	Адаптер F-типа *	Для головок ENDO-MATE DT, TC2 / TASKAL Wizard / iSD900	Z280042
Адаптер KV	Для высокоскоростных наконечников KaVo® под разъем MULTiflex® LUX	Z257020			

* Только для Care3 Plus. Не используется с Care3.
♦ По вопросу установки других наконечников и адаптеров к ним проконсультируйтесь с вашим дилером.
KaVo® и MULTiflex® LUX являются зарегистрированными торговыми марками компании Kallenbach & Voigt GmbH & Co., Германия.
Sirona® является зарегистрированной торговой маркой компании Sirona Dental Systems GmbH, Германия.
W&H® является зарегистрированной торговой маркой компании W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Австрия.
Bien-Air® и Unifix® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bien-Air Dental S.A., Швейцария.

Запчасти

МОДЕЛЬ	ЗАПЧАСТЬ	КОД ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ЗАПЧАСТЬ	КОД ЗАКАЗА
Масло для техобслуживания (1 канистра)	(1 литр)	Z016117	Воздушный фильтр	(1 шт.)	U508352
Масло для техобслуживания (6 канистр)		Y900138	Элемент воздушного фильтра		U508353
Комплект масляных фильтров (12 штук)		Y900159	Плавкий предохранитель (120 В)		U433222
Воронка с фильтром для заливки масла		U433090	Плавкий предохранитель (230 В)		U433223
Воздушный шланг (3 м)		U508038	Масляный абсорбер (набор из 20 штук)		Y900186

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
ТЕЛ: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636
Спецификация может быть изменена без уведомления.

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 1Б, 3 этаж
ТЕЛ: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

NSK

CARE 3 PLUS от NSK

СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ

Care3 Plus

всегда правильное
техническое обслуживание наконечников



Care3 Plus

Автоматическая очистка и смазка Care3 Plus – это залог долгого срока службы вашего наконечника

Быстрый, удобный для пользователя, полностью автоматический и экономичный



Правильное и регулярное обслуживание – это залог высокой производительности и долгого срока службы ваших наконечников. Компания NSK разработала простой в использовании прибор Care3 Plus, для того чтобы вы могли обслуживать наконечники прямо у вас в клинике. С помощью одного нажатия кнопки Care3 Plus автоматически чистит и смазывает до трех наконечников одновременно. Высоко- и низкоскоростные наконечники обслуживаются в аппарате всего за 2 минуты.



Подача воздуха

Подача воздуха включается с помощью кнопки «Air». Эта функция позволяет очистить наконечник от оставшегося в нем раствора.



Воздушный фильтр

Для правильного обслуживания наконечника необходим чистый воздух. Аппарат Care3 Plus поставляется вместе с воздушным фильтром, который легко заменяется и устанавливается в любом удобном для вас месте.



Индикатор уровня масла

Индикатор уровня масла специально размещен на передней панели прибора для максимально удобного контроля уровня масла в емкости.



Легкая чистка

Просто потянув за фиксирующий стержень, вы легко отсоедините переднюю крышку.



Отсутствие распыления масла

Масло, которое вылетает из наконечника при чистке и смазке, впитывается с помощью специальной системы масляных фильтров. Фильтры легко заменяются (поставляются в упаковке по 12 штук).




Шнур питания с L-образным штекером

Шнур питания с L-образным штекером позволяет устанавливать Care3 Plus практически в любом помещении.



Панель управления Care3 Plus интуитивно понятна и проста в использовании

Выбор цикла работы:
S – короткий цикл для высокоскоростных наконечников
L – длинный цикл для низкоскоростных наконечников
E – дополнительно увеличенный цикл для понижающих наконечников и т.д.

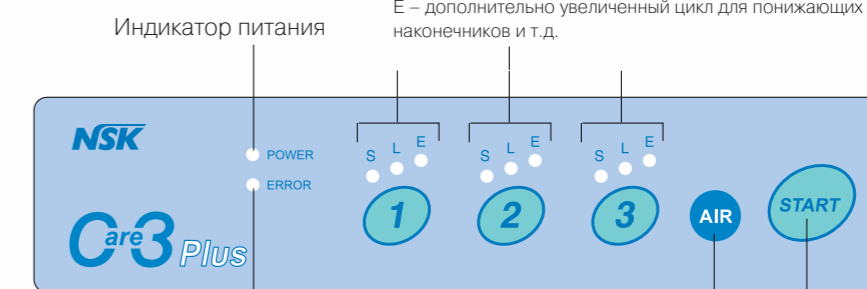

Индикатор питания

Индикатор ошибки

Кнопка подачи воздуха
Кнопка начала работы



Емкость для масла

Вместимость емкости для масла позволяет произвести чистку и смазку 3500 наконечников (цикл S) без дозаправки. Чтобы наполнить емкость, нужно всего лишь открыть пробку на верхней части прибора и залить в отверстие масло для техобслуживания Care3 Plus.



Подключение наконечников NSK и других марок

Низкоскоростные наконечники NSK и других брендов напрямую подсоединяются к разъемам. Высокоскоростные наконечники NSK подключаются с помощью PTL-адаптера. Для большинства других марок высокоскоростных наконечников доступны специальные адаптеры.

Удобная функция памяти

Функция памяти, предусмотренная в Care3 Plus, запоминает и мгновенно воспроизводит параметры последнего цикла работы при включении прибора. Благодаря функции памяти, больше нет необходимости заново устанавливать параметры предыдущего цикла обслуживания наконечников.

Индикатор окончания цикла работы

После окончания цикла обслуживания наконечников издается звуковой сигнал.

Простота управления



Откройте дверцу и присоедините 3 наконечника к разъемам Care3 Plus.



После установки наконечников закройте дверцу. Care3 Plus не начнет работу, пока дверца не будет правильно закрыта.



Выберите наиболее подходящий цикл работы для каждого наконечника: S, L или E.

- S**: цикл S (прибл. 35 сек.) для высокоскоростных наконечников
- L**: цикл L (прибл. 45 сек.) для низкоскоростных наконечников
- E**: цикл E (прибл. 50 сек.) для повышающих, понижающих наконечников и т.д.

* На рисунках в рамке показан цикл чистки и смазки наконечников.



Нажмите на кнопку начала работы, и менее чем за 2 минуты все наконечники будут правильно очищены и смазаны.

(При выборе одного длинного и двух коротких циклов.)