

NSK

СЕРИЯ VARIOS ОТ NSK

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СКАПЕРЫ

Varios 350

КОМПАКТНЫЙ размер, простая установка




Powerful Partners®

Компактный размер блока управления и легкий наконечник

Varios 350 был разработан как компактная портативная система с возможностью быстрого и простого подключения к любой стоматологической установке. Varios 350 прост в обращении и используется для выполнения широкого спектра клинических процедур: удаление зубных отложений, пародонтология и эндодонтия. Для заказа доступны модели как с оптикой, так и без оптики.

Один регулятор для выбора любого режима работы (удаление зубных отложений, пародонтология и эндодонтия)

Поверните регулятор, чтобы выбрать один из 3-режимов мощности. Каждый режим соответствует определенному типу насадок. Выбор режима: «G» (общий), «E» (эндодонтия), «P» (пародонтология). Выбранный режим отображается цветовым индикатором на передней панели блока управления. Шкала мощности обеспечивает точную настройку каждого режима. При выборе режима «P» обеспечивается абсолютный стабильный минимум мощности для эффективного проведения пародонтологического лечения.

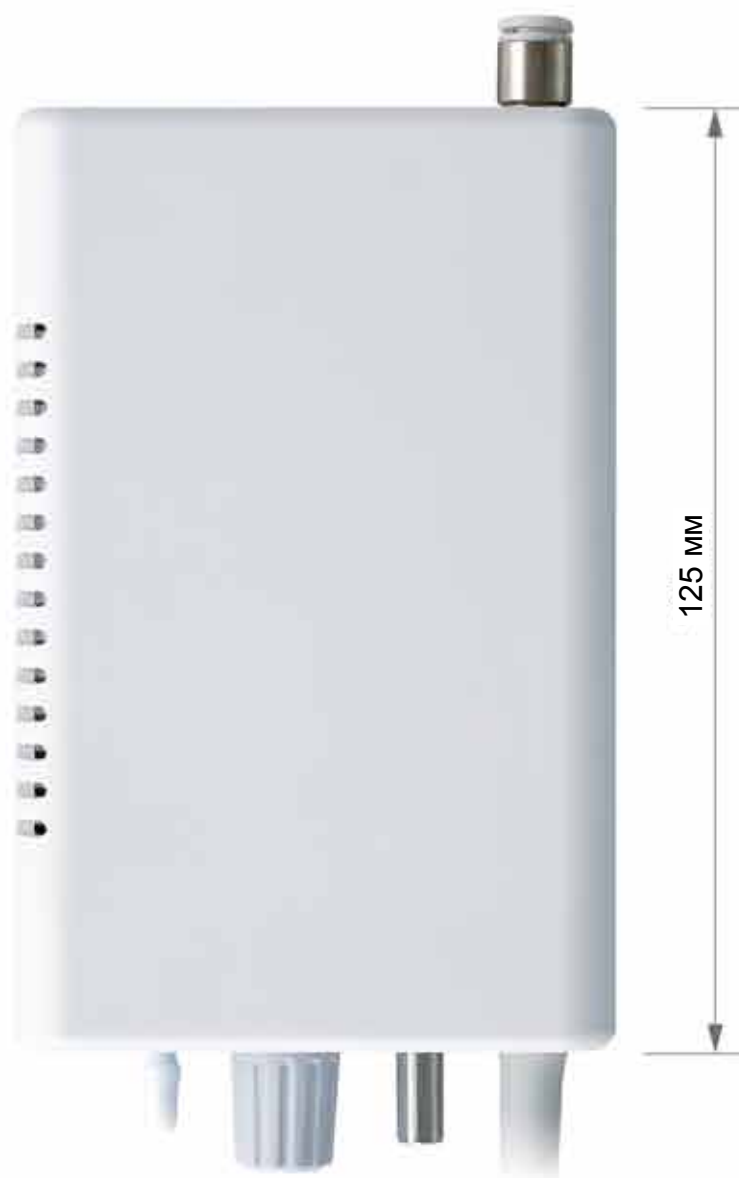

(действительный размер)

Простое крепление на любую стоматологическую установку. Примеры крепления Varios 350



С правой стороны блока врача



За блоком врача



Под блоком врача



На плече стоматологической установки

Ультразвуковые скалеры обеспечивают наибольшую универсальность – «все в одном»

Благодаря большому выбору насадок ультразвуковые аппараты Varios используются для любых клинических манипуляций.



С оптикой

VA-LUX-HP Наконечник с оптикой



Без оптики

VA-HP Наконечник без оптики


Легкий и компактный

Маленький, легкий и удобный наконечник весит всего 33 грамма (VA-HP), поэтому рука врача не устает даже при проведении длительных операций.

Круговая система подсветки



Круговая подсветка наконечника с оптикой VA-LUX-HP точно освещает рабочую область, что значительно повышает эффективность лечения и сокращает время проведения процедур.

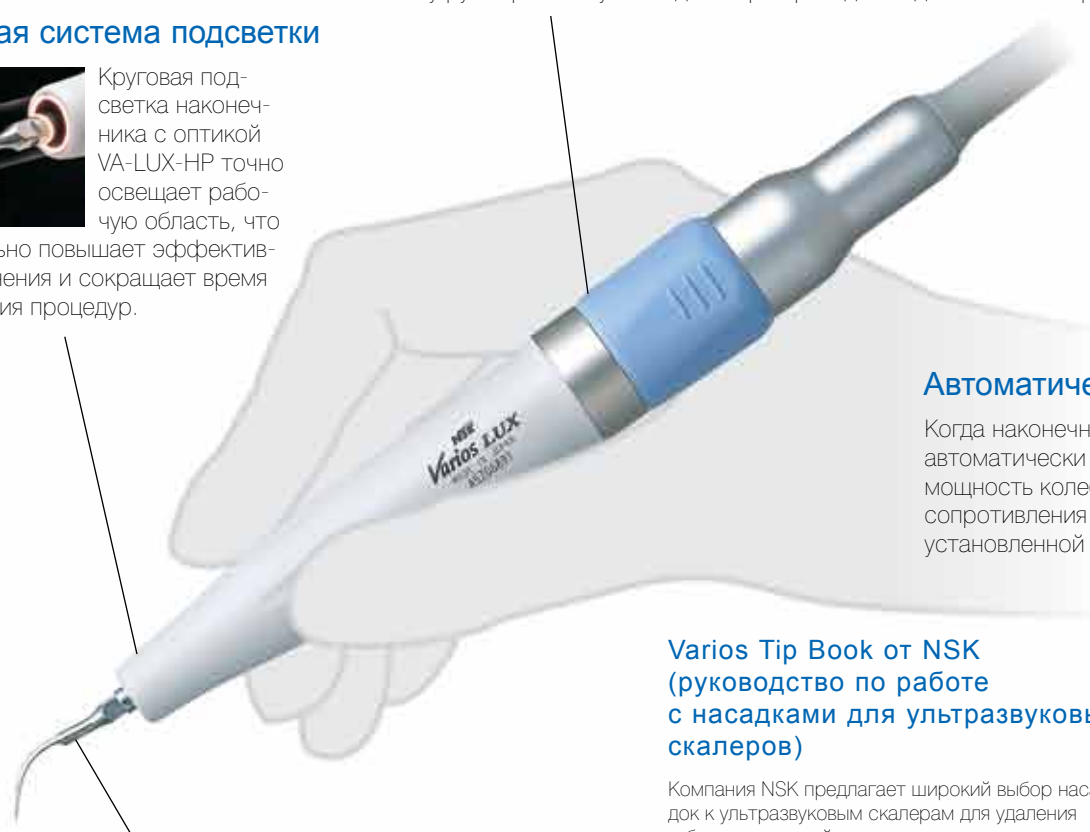

Автоматическая настройка


Когда наконечник включен, он автоматически подстраивает мощность колебаний относительно сопротивления каждой установленной насадки.

Широкий выбор насадок

Насадки для ультразвуковых скалеров используются для широкого спектра процедур.

Varios Tip Book от NSK (руководство по работе с насадками для ультразвуковых скалеров)

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам для удаления зубных отложений, пародонтологических, реставрационных операций, снятия коронок и уплотнения пломбировочных материалов. В данном руководстве описано применение каждой насадки для конкретных видов лечения.

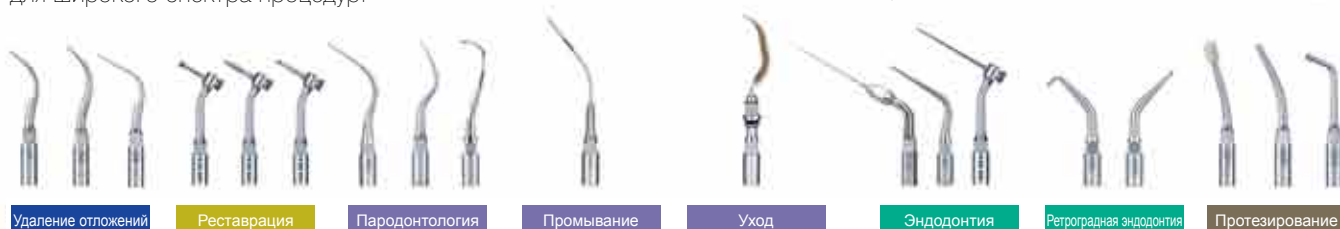

Удаление отложений

Реставрация

Пародонтология

Промывание

Уход

Эндодонтия

Ретроградная эндодонтия

Протезирование

Комплекты *Varios 350*



Технические характеристики

- Питание: 120 В или 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Частота: 28-32 кГц
- Макс. мощность: 8 Вт (режим G)
- Размеры: Ш 80 x Д 125 x В 32 (мм)
- Вес системы (включая блок управления и наконечник): 440 г (350 LUX), 393 г (350)

С оптикой Varios 350 LUX

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
VA350 LUX (120В)	Y140960
VA350 LUX (230В)	Y140962

Без оптики Varios 350

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
VA350 (120В)	Y140952
VA350 (230В)	Y140954

Комплектация

- Блок управления со шлангом наконечника
- Блок питания
- Наконечник
- Держатель наконечника
- Набор для подключения фильтра для воды
- Соединительное устройство системы подачи воды (только для 120 В)
- Педаль (FC-61)
- 3 насадки (G1, G4, G6)
- Ключ для замены насадки с ограничителем крутящего момента
- Держатель для насадок
- Колпачок для насадки типа S

Запчасти

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
VA-LUX-HP Наконечник с оптикой		E250050
VA-HP Наконечник без оптики		E177050
Блок управления Varios 350 LUX		U449001
Блок управления Varios 350		U423001
Блок питания VA350 для Varios 350 LUX и 350		U429001(120В) U430001(230В)
FC-61 Педаль (с кабелем 4 м) для Varios 350 LUX и 350		Z300001
Трубка подачи воды (2 м)		U387580
Соединительное устройство системы подачи воды		U387030
Набор для подключения фильтра для воды (2 трубки подачи воды, фильтр для воды, корпус фильтра)		U387040
Корпус фильтра для воды		Y900069
Фильтр для воды		U387042
Защитное кольцо для шланга наконечника		E250075
Соединительное кольцо (2 штуки в комплекте)		Y900077

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
CR-10 Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента		Z221076
Ключ для замены насадок E-типа		Z217399
Держатель для насадок		Z221080
Колпачок для насадки типа L		Z217850
Колпачок для насадки типа S		Z217851
Кронштейн для Varios 350		Z254
Монтажный кронштейн для Varios 350		Z259
Держатель блока управления для Varios 350		Z253
Лампочка VA (3 штуки в комплекте)		Y900107
Держатель наконечника для Varios 350		Z250001
Гаечный ключ (5 x 8)		Y1001301
Уплотнительное кольцо (для наконечника без оптики)		0312012 100

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3 этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08