




Varios
iPiezo engine®



NAKANISHI INC.	NSK Rus & CIS
www.nsk-inc.com	www.nsk-russia.ru
700 Shimochinata Kanuma-shi Tochigi 322-8666, Japan	Россия, 115114, Москва, Дербневская наб., д. 7, стр. 16, 3-й этаж
TEL : +81 (0)289-64-3380	ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
FAX : +81 (0)289-62-5636	ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

PR-D613R Ver.2 11.04.01OP



Многофункциональность
и производительность



Varios

iPiezo engine®

Доверьтесь своей интуиции

Новые стильные и multifunctional скалеры Varios оснащены интуитивным генератором iPiezo engine® от NSK, обладающим функцией самонастройки и позволяющим эффективнее проводить лечебные процедуры. Более того, широкий спектр насадок делает список методов клинического применения бесконечным: от Пародонтологии, Снятия зубных отложений и Эндодонтии до Ухода за имплантатами. Двойная светодиодная подсветка LED на кончике эргономичного и тонкого наконечника обеспечивает отличный обзор и легкое обнаружение зубного камня и налета во время проведения процедур гигиены полости рта и снятия зубных отложений.

Varios2 Наконечники



Невероятная производительность

При весе всего 33 г наконечник Varios очень тонкий и удобный в обращении. Он обеспечивает превосходную производительность и в то же время снижает усталость кисти врача даже при проведении длительных процедур. Двойная подсветка LED обеспечивает исключительную, практически бестеневую видимость операционного поля, улучшая в значительной степени условия проведения процедур. Легкий, компактный и удобный наконечник обладает выдающейся производительностью и соответствует всем вашим требованиям для проведения различных клинических процедур.

Преимущества:

- Самый тонкий и легкий наконечник с оптикой LED
- Двойная подсветка LED через два оптических световода
- Наконечник с оптикой и без оптики
- Широкий спектр насадок для различных клинических применений



Хорошо сбалансированный, тонкий и легкий наконечник с оптикой LED

Компактный наконечник обеспечивает превосходный доступ и обзор обрабатываемой зоны, делая проведение операции более комфортным. Наконечник может многократно автоклавироваться при температуре до 135 °С.



Наконечник Varios2



Аналог



С оптикой



Без оптики



Двойная подсветка LED





Светодиодная оптика LED от NSK излучает дневной свет, что является значительным преимуществом в вашей работе.

Ярче: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучший обзор обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее: LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.

*По данным на ноябрь 2009 г.

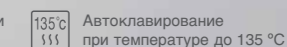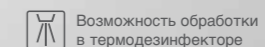

Varios 970

С оптикой / Без оптики

iPiezo engine®

Многофункциональный портативный прибор для широкого спектра операций

Все в одном – стильный компактный универсальный прибор для Пародонтологии, Снятия зубных отложений, Минимально инвазивных операций и Ухода за имплантами. Удобные вместительные емкости по 400 мл, заполняемые одинаковыми или различными растворами, подсоединены к независимым друг от друга насосам. Все скалеры из новой серии Varios оснащены последними разработками в области пьезотехнологии; генератор iPiezo engine® от NSK обеспечивает стабильную выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых колебаний до оптимального значения в зависимости от нагрузки.



Большой светодиодный дисплей

Все рабочие параметры четко видны на большом LED-дисплее и легко регулируются при помощи интуитивно понятных кнопок.



iPiezo engine®

Функция обратной связи

iPiezo engine® от NSK поддерживает необходимую мощность в зависимости от типа зубной поверхности. iPiezo engine® обеспечивает стабильную частоту колебаний насадки без потери мощности даже при снятии очень твердых зубных отложений.

Функция самонастройки

Функция самонастройки обеспечивает постоянную и стабильную частоту ультразвуковых колебаний насадки в пределах выбранного диапазона мощности. Это позволяет доктору чувствовать выходную мощность, работать точно и гарантированно получать идеальные результаты.



Простая замена емкостей

2 большие емкости по 400 мл быстро и легко снимаются и устанавливаются. В емкости можно заливать необходимые растворы для различных клинических операций.



Функция памяти


В целях экономии времени при настройке прибора пользовательские параметры, включая мощность и скорость подачи жидкости, могут быть сохранены в памяти прибора. Кроме того, даже при выключении прибора из сети настройки остаются в памяти.

Безупречный дизайн прибора для чистки и обслуживания

Простой и бесшовный дизайн блока управления позволяет легко проводить гигиеническое обслуживание для ежедневного использования.

Регулировка скорости потока жидкости для правой и левой емкостей, а также для воды из магистрали

Varios 970 может использовать подачу жидкости как из одной из емкостей, так и из магистрали. Выберите режим подачи жидкости при помощи кнопки на панели управления. Светодиодный индикатор указывает, какая емкость используется в данный момент.

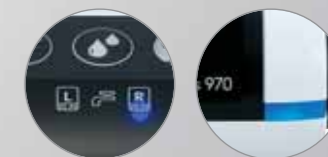

Varios 970

С оптикой / Без оптики

iPiezo engine®

Повышенная устойчивость к антисептическим растворам

Использование трубок на основе полимерных материалов для емкостей, насоса и наконечника гарантирует значительное повышение надежности, так как существенно сокращается возможность образования коррозии, вызываемой остатками антисептических растворов.



Режим автоматической очистки

Режим автоматической очистки позволяет промыть водой шланги и наконечник при помощи одного нажатия кнопки после использования специальных растворов. Во время режима автоматической очистки Varios 970 независимо промывает оба ирригационных канала.



Регулировка скорости потока

Обновленный дизайн блока управления оснащен поворотными регуляторами и электронным отображением скорости потока жидкости. Такое управление делает настройку скорости потока жидкости, как из емкостей, так и из магистрали, очень простой и удобной.




Педаля управления 360°

Новой педалью Varios можно легко управлять с любой стороны.

МОДЕЛЬ: **FC-70**
КОД ЗАКАЗА: **Z1008001**

- С кабелем 2,5 м

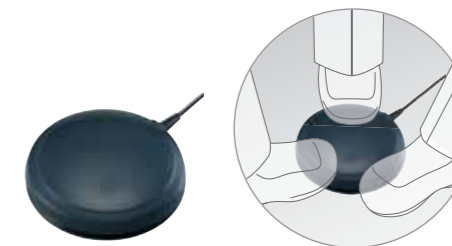

Бокс для стерилизации, ключ для замены насадок

Бокс для стерилизации создан для того, чтобы безопасно обрабатывать и хранить компоненты системы Varios.



МОДЕЛЬ: **Ключ для замены насадок**
КОД ЗАКАЗА: **Z221076**



МОДЕЛЬ: **Бокс для стерилизации**
КОД ЗАКАЗА: **Z1035001**

Комплекты Varios 970



С оптикой Комплекты Varios 970 с оптикой

МОДЕЛЬ: **VA970 LUX (120 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001166**

МОДЕЛЬ: **VA970 LUX (230 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001168**

Без оптики Комплекты Varios 970 без оптики

МОДЕЛЬ: **VA970 (120 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001174**

МОДЕЛЬ: **VA970 (230 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001175**

Технические характеристики

- Питание: 120 В или 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Частота: 28–32 кГц
- Макс. мощность: 11 Вт (режим G)
- Размеры: Ш160 x Д270 x В190 (мм) (включая емкости)
- Вес блока: 2,1 кг (без наконечника)
- Объем емкости: 400 мл (x 2 емкости)

Комплектация

- Блок управления
- Наконечник
- Шланг наконечника
- 3 насадки для снятия зубных отложений (G4, G6, G8)
- Педаля (FC-70)
- 2 емкости
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента
- Кабель питания
- Бокс для стерилизации


Varios 370

С оптикой / Без оптики

iPiezo engine®

Компактный многофункциональный блок управления, помещающийся на ладони

Varios 370 был специально разработан как компактный портативный прибор, который легко устанавливается на любую стоматологическую установку. Он прост в управлении и может использоваться для широкого спектра клинических применений.

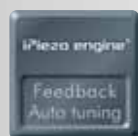


Преимущества:

- Функция iPiezo engine®
- Портативный и суперкомпактный блок управления
- Простая интуитивно понятная панель управления
- Большие и удобные регуляторы скорости подачи воды и настройки мощности
- Держатель для крепления на установку входит в комплект
- Наконечник может обрабатываться в термодезинфекторе и автоклавироваться при температуре до 135 °C

Держатель блока управления

Держатель включен в полный комплект и может быть использован для различных позиций крепления прибора.

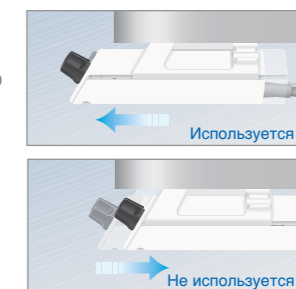

Примеры установки Varios 370



На плече столика врача стоматологической установки при помощи кронштейна. (приобретается отдельно)



Над/под столиком врача при помощи держателя.



За столиком врача при помощи кронштейна. (приобретается отдельно)

Комплекты Varios 370



С оптикой Комплекты Varios 370 с оптикой

МОДЕЛЬ: **VA370 LUX (120 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001958**

МОДЕЛЬ: **VA370 LUX (230 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001343**

Без оптики Комплекты Varios 370 без оптики

МОДЕЛЬ: **VA370 (120 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001956**

МОДЕЛЬ: **VA370 (230 В)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001340**

Технические характеристики

- Питание: 120 В или 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Частота: 28–32 кГц
- Макс. мощность: 11 Вт (режим G)
- Размеры: Ш80 x Д115 x В32 (мм) (без регуляторов и шланга)
- Вес блока: 0,43 кг (без наконечника)

Комплектация

- Блок управления со шлангом наконечника
- Держатель блока управления
- Блок питания
- Наконечник
- Держатель наконечника
- Набор для подключения фильтра для воды
- Соединительное устройство системы подачи воды (только для 120 В)
- Педаль (FC-71)
- 3 насадки для снятия зубных отложений (G4, G6, G8)
- Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента